

上下顎両側 第一、第二、第三大白歯対応

CAD/CAM冠 PEEK

2023年12月の期中収載により特定保険医療材料であるCAD/CAM冠用材料において、CAD/CAM冠用材料としてPEEKブロック（V）が新しく保険適用になりました

製品名

注・製品色調は撮影環境、状況で見た目が変わります



CAD/CAM冠 PEEK

PEEKブロック（V）
シェード アイボリーのみ・ロットシール添付

製品価格 ▶ お問い合わせください

製品特徴 CAD/CAM冠 PEEKについて



適応部位

上下顎両側 第一、第二、第三大白歯

※CAD/CAM冠用材料（Ⅲ）とは異なり、第2大白歯の咬合関係の有無や金属アレルギーの有無にかかわらず、使用可能

支台歯形成（メーカー推奨値）

咬合面1.0mm以上・マージン部0.6mm以上のディープシャンファー又はラウンデッドショルダー

※CAD/CAM冠用材料（V）を使用したCAD/CAM冠を装着する場合、歯質に対する接着力を向上させるためにサンドブラスト処理及びプライマー処理を行い接着性レジンセメントを用いて装着してください



メーカー指定の接着材料・接着ステップを遵守してください



製品保証

口腔内装着後、1年以内の破折が対象

保証サポートの適応は弊社保証規定の条件を満たした臨床ケースが対象になります
保証規定の詳細内容はWEBでご確認ください

株式会社
コアデンタルラボ横浜

Core dental

〒233-0007 神奈川県横浜市港南区大久保1-5-26

☎045-840-0811

FAX 045-840-0813

<https://www.core-dental.co.jp/>



CAD/CAM冠 PEEKについて
特設webサイトで紹介しています

Search コアデンタルラボ横浜 🔍